

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

CPR MANIKIN PRACTI-MAN

Advance
ESSENTIAL FOR MASSIVE TRAINING EVENTS

1 Εάν ο θώρακας ΔΕΝ ανασηκώνεται όταν παρέχετε τεχνητή αναπνοή, ελέγξτε τα ακόλουθα:

ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ:

- Είναι σωστά συναρμολογημένη
- Είναι σωστά τοποθετημένη στο κεφάλι



ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ:

- Είναι τοποθετημένη στο κυκλικό σημάδι ανάμεσα στο στήθος του προπλάσματος.
- Περνάει άνετα από τον λαιμό.
- Δεν τσακίζει ή ζαρώνει σε κάποιο σημείο.
- Δεν είναι σκισμένη ή υπάρχει κάποια διαρροή.
- Δεν περιέχει υγρασία μέσα.



ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ:

- Είναι σωστά συνδεδεμένο με το σώμα.
- Η κλίση της κεφαλής είναι σωστή.



ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

- Είναι σωστά τοποθετημένο στο κεφάλι.
- Έχει μπει σωστά στην εγκοπή στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
- Έχει γίνει σωστή επαφή με την μύτη του κεφαλιού.



2 Σωστή χρήση του πνεύμονα και της βαλβίδας

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ


Αντιθέτως με άλλα προπλάσματα της αγοράς, οι σακούλες πνευμόνων του **Practi-Man ADVANCE** είναι ημι-αναλώσιμη. Με άλλα λόγια, υπό φυσιολογικές συνθήκες η σακούλα είναι κατάλληλη για χρήση, σε ένα ολοκληρωμένο μάθημα, από μια ομάδα εκπαιδευόμενων χωρίς να χρειαστεί αλλαγή.



Εάν, κατά την διάρκεια του μαθήματος, το στήθος σταματήσει να ανασπώνεται, ελέγξτε τον πνεύμονα αν είναι υγρός, καθώς η υγρασία μπορεί να επηρεάσει την ορθή ροή αέρα. Εάν είναι υγρός ο πνεύμονας, αντικαταστήστε τον με καινούργιο.

ΒΑΛΒΙΔΑ

Όπως ο πνεύμονας, έτσι και η βαλβίδα του Practi-Man ADVANCE είναι ημι-αναλώσιμη, και ως εκ τούτου θα πρέπει να διατηρείται στεγνή προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή χρήση της. Δεν υπάρχει προκαθορισμένος αριθμός χρήσεων· παρόλα αυτά, συνιστάται να αντικαθίσταται με κάποια άλλη όταν δείτε ότι πλέον δεν είναι αποτελεσματική.

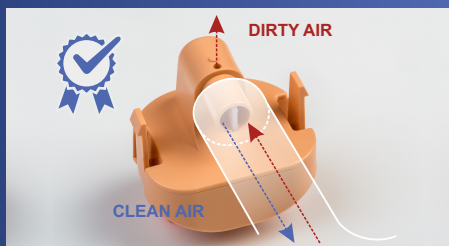

3 Αν δεν ακούσετε το «κλικ» όταν πραγματοποιείτε θωρακικές συμπίεσεις, ελέγξτε:

- Ότι ο διακόπτης στο πίσω μέρος του προπλάσματος δεν είναι γυρισμένος στην επιλογή ΕΛΕΥΘΕΡΟ (NEUTRAL).
- Ότι ο διακόπτης δεν έχει μείνει κατα λάθος ανάμεσα σε δυο επιλογές.

