

AAJT-S Tourniquet Κοιλιακής Αορτής

€679.62

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Το AAJT-S είναι ένα κοιλιακό και αορτικό Junctional Tourniquet. Είναι το μοναδικό πολυλειτουργικό tourniquet στον κόσμο για εφαρμογή στη μασχάλη, στην κοιλιά, στη βουβωνική περιοχή για τον έλεγχο της αιμορραγίας των συνδέσμων και της πυέλου και για τη σταθεροποίηση πνευλικών καταγμάτων και Ζώνη 3 REBOA.

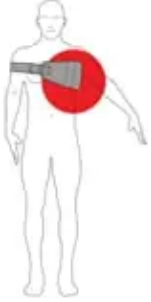
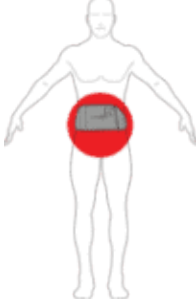
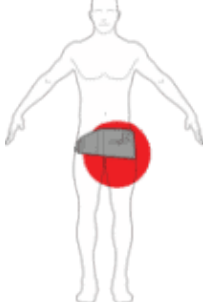
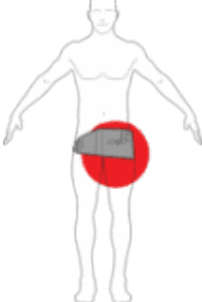
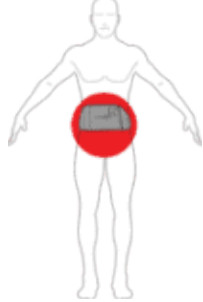
Η Compression Works είναι ο σχεδιαστής και ο κατασκευαστής του Abdominal Aortic & Junctional Tourniquet – Stabilized (AAJT-S). Η Compression Works προσφέρει καινοτόμες λύσεις για την κάλυψη των πιο πιεστικών και ανεκπλήρωτων αναγκών των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί στην έρευνα για τον έλεγχο της αιμορραγίας, τον εντοπισμό κενών στις ικανότητες και την ανάπτυξη τεχνολογιών και προϊόντων που θα βοηθήσουν στη διευκόλυνση της παροχής ποιοτικής σωτηρίας φροντίδας. Οι λύσεις ελέγχου της αιμορραγίας του Compression Works χρησιμοποιούνται από στρατούς σε όλο τον κόσμο, καθώς και από κέντρα τραύματος των ΗΠΑ, τμήματα έκτακτης ανάγκης αγροτικών περιοχών, EMS και ομοσπονδιακές έως τοπικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Η Compression Works είναι μια επιχείρηση που ανήκει σε βετεράνους, αφιερωμένη στο να σώζει ζωές εντός και εκτός του πεδίου της μάχης. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται και συναρμολογούνται στις Η.Π.Α.

Προβλεπόμενη χρήση:

- Γρήγορη σύνδεση της ζώνη για άμεση εφαρμογή
- Ιμάντας καστανίας για σταθερότητα της συσκευής στη θεραπεία και τη μεταφορά ασθενών
- Φούσκα συμπίεσης σε σχήμα σφήνας για συμπίεση ευρείας περιοχής
- Ευανάγνωστος μετρητής φουσκώματος
- Ελαφριά και συμπαγής συσκευασία
- Μία συσκευή, πολλαπλές χρήσεις

Χρήση του abdominal and aortic junctional tourniquet:

1. Ασφαλίστε τη συσκευή γύρω από τον κορμό. Συνδέστε τον ιμάντα καστανίας μέχρι το ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ.
2. Τοποθετήστε πάνω από στη στοχευμένη περιοχή.
3. Σφίξτε τη ζώνη και αφαιρέστε όλα τα μπόσικα.
4. Χρησιμοποιήστε την πόρπη με καστανία για να ολοκληρώσετε τη σύσφιξη.
5. Φουσκώστε τη φούσκα μέχρι να εμφανιστεί η ΠΡΑΣΙΝΗ ένδειξη στον μετρητή.

				
Μασχάλη	Κοιλιακή χώρα	Βουβωνική χώρα	Κατάγματα πυέλου	REBOA – Ζώνη 3
Είναι εγκεκριμένο από το FDA για όλα τα σημεία αιμορραγίας διασταύρωσης και μπορεί να παραμείνει ενεργό για έως και τέσσερις ώρες σε αυτές τις θέσεις.	Το AAJT-S συμπιέζει την κοιλιακή αορτή όταν εφαρμόζεται στο μέσο της κοιλιάς για τον έλεγχο της αιμορραγίας στη λεκάνη, τη βουβωνική χώρα και τα πόδια.	Το AAJT-S είναι το ΜΟΝΟ διασταυρωτικό tourniquet που έχει τεκμηριωθεί ότι έχει σώσει ανθρώπινη ζωή σε ενδείξεις άνω και κάτω διασταύρωσης.	Το AAJT-S έχει εγκριθεί για τη σταθεροποίηση της λεκάνης.	Το AAJT-S έχει αποδειχθεί να είναι ισοδύναμο με τη Ζώνη 3 REBOA.