

Tourniquet Μάχης Compat Application C-A-T Gen7 - Ιμάντας Ίσχαιμης Περίδεσης - Πορτοκαλί

€33.87

[Αγορά](#)



Περιγραφή

Παρά την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του **Combat Application Tourniquet**, το νέο **C-A-T GEN7** κάνει ακόμη ευκολότερη και γρήγορη τη χρήση του. Όλα και τα 6 του στοιχεία έχουν επανασχεδιαστεί και βελτιωθεί στο **C-A-T GEN7** τουρνικέ.

1. Πόρπη μονής διαδρομής
Η πόρπη μονής διαδρομής μειώνει ακόμη περισσότερο την απώλεια αίματος, απαιτεί λιγότερες περιστροφές του πύρου ενώ κάνει το C-A-T GEN7 απλούστερο στην εκπαίδευση τοποθέτησης του.

2. Πύρος
Ο πύρος στο νέο CAT Gen7 έχει μεγαλύτερη



διάμετρο,
ενισχυμένη
αντοχή και το
κυριότερο
αντιολισθητική
επαφή
βοηθώντας έτσι
στην
τοποθέτηση του
σε πεδία μάχης
και σε
καταστάσεις
οπού τα χέρια
του τραυματία ή
του διασώστη
δεν έχουν και
την καλύτερη
πρόσφυση.

**3. Γάντζος
ασφάλισης πύρου**
Ο γάντζος
ασφάλισης πύρου
δίνει τη
δυνατότητα στον
πίρο να εισέλθει
μέσα του από
οποιαδήποτε
πλευρά επιθυμεί ο
χρήστης. Αυτό
σημαίνει ότι ο
χρήστης μπορεί
να βάλει τον πύρο,
στον γάντζο, είτε
τον γυρίσει
δεξιόστροφα είτε
αριστερόστροφα.

4. Ιμάντας πύρου
Νέος ενισχυμένος
ιμάντας χρώματος
γκρι με κλείσιμο
Velcro ο οποίος
προσφέρει μια
έξτρα ασφάλιση
στον πύρο έτσι
ώστε να
παραμείνει στη
θέση του.
Επιπλέον, φέρει
την αναγραφή
«Time» επάνω
του έτσι ώστε ο
διασώστης να
αναγράψει την
ώρα τοποθέτησης

του τουρνικέ στον τραυματία.

5. Πόρπη σταθεροποίησης
Η ενισχυμένη, λοξότμητη ράβδος επαφής διατηρεί την ακεραιότητα της πόρπης σταθεροποίησης και μειώνει τον τραυματισμό του δέρματος.

6. Εσωτερικός Ιμάντας
Ο ιμάντας του C-A-T GEN7 έχει ταινία Velcro κατά μήκος του έτσι ώστε να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη σταθερότητα κατά την εφαρμογή του ενώ ένας δεύτερος, εσωτερικός ιμάντας (ελεύθερης κίνησης) κατανέμει ισόποσα την περιφερειακή πίεση.

Το **Combat Application Tourniquet (C-A-T)** είναι ένα πραγματικό τουρνικέ που **χρησιμοποιείται με το ένα χέρι**. Έχει την ικανότητα να φράζει την αρτηριακή και φλεβική ακατάσχετη αιμορραγία ενός μεγάλου τραύματος.

Το C-A-T χρησιμοποιεί λαβή σύσφιξης με έναν εσωτερικό ιμάντα, ο οποίος είναι ελεύθερος στην κίνησή του παρέχοντας πραγματική κυκλοφορική πίεση στο άκρο (χέρι – πόδι). Μόλις σφίχτεί και σταματήσει η αιμορραγία, η λαβή σύσφιξης μπορεί να κλειδώσει. Ένας ιμάντας Velcro αμέσως μετά εφαρμόζεται για περαιτέρω ασφάλεια στη λαβή σύσφιξης κατά τη διάρκεια μεταφοράς του τραυματία προς το νοσοκομείο.

Σταματά σε δευτερόλεπτα την ακατάσχετη αιμορραγία των άκρων ακόμη και από βαλλιστικά τραύματα.

Από 02/07/2024 η FIRST AID SHOP O.E. είναι ο εξουσιοδοτημένος επίσημος διανομέας της C•A•T Resources, LLC σε Ελλάδα και Κύπρο. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες και τιμοκατάλογο χονδρικής για το Tourniquet C-A-T Gen7.

Χαρακτηριστικά

The document was created on: Ιανουάριος 10, 2025